


**1. I. Narzędzia**

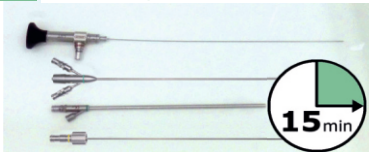

**15 min**


Całkowicie zanurzyć wszystkie narzędzia na **15 min.** W roztworze czyszczącym (RT).  
**Dezynfekcja:** roztwór środka czyszczącego (np. Cidezyme/Enzol 0.8%)  
 Wszystkie kanały muszą być wypełnione roztworem czyszczącym

**2. II. Kąpiel Ultradźwiękowa**



Całkowicie zanurzyć wszystkie narzędzia wolne od pęcherzyków powietrza w kąpeli ultradźwiękowej  
**MUSZA** zostać użyte trzy płaszcze z kanałem wodnym, nie Ultra-Mini Nefroskop!

**3. III. Wycieranie**

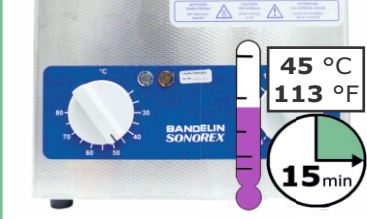


Zostaw narzędzia w kąpeli ultradźwiękowej na **15 min.** w **45 °C / 113 °F**.  
**Dezynfekcja:** roztwór środka czyszczącego (np. Cidezyme/Enzol 0.8%)

**4. III. Wycieranie**




Wytrzyj wszystkie narzędzia przy użyciu miękkiej i wilgotnej ściereczki nasączonej środkiem czyszczącym do póki ślady użycia są widoczne na produkcie.

**5. IV. Szczotki**

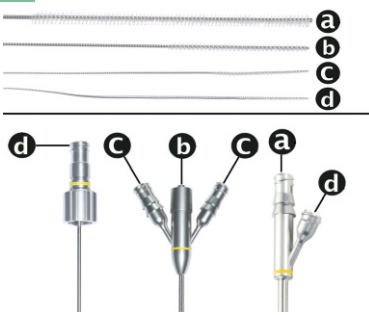

Użyj szczotek do czyszczenia jak na obrazku **a, b, c i d.**

**7. V. Płukanie**

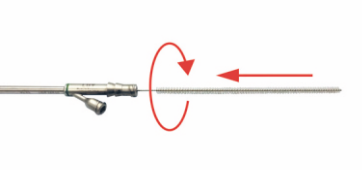

Nanieś na powłokę środek czyszczący (RT), i czyść do póki widoczne są ślady użytkowania.  
 Włóż szczotkę stroną bez włosia i poruszaj okrężnymi ruchami

**7. V. Płukanie**



Przeplucz wszystkie kanały narzędzi co najmniej **trzy** razy przez **1 min** środkiem czyszczącym (RT) używając strzykawki jednorazowej o pojemności 50 ml.  
**Dezynfekcja:** roztwór środka czyszczącego (np. Cidezyme/Enzol 0.8%)

**8. VI. Płukanie**




Przeplucz wszystkie narzędzia **trzy** razy wodą iniekcyjną oraz zdemineralizowaną (RT) używając strzykawki jednorazowej o pojemności 50 ml.

**9. VII. Płukanie**



Zanurz wszystkie narzędzia w świeżej, iniekcyjnej, zdemineralizowanej wodzie (RT) i spłucz je **trzy** razy używając strzykawki jednorazowej o pojemności 50 ml.

**10. VIII. Dezynfekcja**

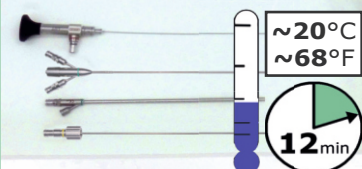

Całkowicie zanurz narzędzia wolne od pęcherzyków powietrza na **12 min.** w **20-25 °C / 68-77 °F** w roztworze dezynfekującym (RT).  
**Dezynfekcja:** roztwór Aldehydu orto-ftalowego (np. Cidex OPA 0.55%)

**11. IX. Płukanie końcowe**




Włącz blokadę Ultra-mini Nefroskopu i wprowadź środek czyszczący (RT) następnie obróć **trzy** razy w każdym kierunku do póki ślady użytkowania są widoczne na produkcie.

**12. X. Suszenie**



Przeplucz wszystkie kanały **trzy** razy środkiem czyszczącym (RT) używając jednorazowej strzykawki o pojemności 50 ml.

**13. IX. Płukanie końcowe**

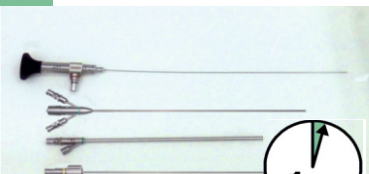

**1 min**

Całkowicie zanurz wszystkie narzędzia na **min. 1 min.** W **min. 7.5 litrach**, iniekcyjnej, zdemineralizowanej wodzie (RT)  
 Wszystkie kanały muszą być wypełnione środkiem czyszczącym

**14. X. Suszenie**



Spłucz wszystkie narzędzia trzy razy używając iniekcyjnej, zdemineralizowanej wody (RT) oraz jednorazowej strzykawki o pojemności 50 ml.  
 Powtórz tę czynność **dwu** krotnie z świeżą, iniekcyjną, zdemineralizowaną wodą za każdym razem

**15. X. Suszenie**



Wysusz produkt używając ściereczki.

**16. XI. Wycieranie**



Osusz płaszc i powierzchnię przy użyciu powietrza medycznego  
**Maksimum 0.5 bar!**

RT = Temperatura pokojowa