



# optiLube<sup>TM</sup> active

sterylny żel nawilżający  
z Lidocainą

OptiLube Active<sup>TM</sup> to sterylny żel nawilżający zawierający środek znieczulający (Lidocaina 2%) i antybakteryjny (Chlorhexidina 0,25%). Każda gotowa do użycia strzykawka znajduje się w sterylnym opakowaniu. OptiLube Active<sup>TM</sup> dostępny jest w gotowych strzykawkach o pojemności 6ml i 11ml.

OptiLube Active<sup>TM</sup> ma zastosowanie przy cewnikowaniu i umieszczaniu przyrządów w jamach ciała.

Żel zapewnia optymalne nawilżenie, natomiast miejscowy środek znieczulający likwiduje ból, a przeciwbakteryjne właściwości środka ograniczają ryzyko infekcji.


6ml e

11ml e

STERILE R CE 0473

## Jak używać sterylnego żelu nawilżającego OptiLube Active<sup>TM</sup> w cewnikowaniu moczowodów techniką aseptyczną

- Usuń strzykawkę ze sterylnego woreczka odrywając papierek ochronny.
- Delikatnie naciśnij tłoczek na końcu strzykawki.
- Usuń niebieską zatyczkę.
- Nanieś małą ilość OptiLube Active<sup>TM</sup> dookoła ujścia moczowodu.
- Delikatnie wprowadź końcówkę do moczowodu.
- Wywierając jednorodny nacisk na strzykawkę powoli wstrzyknij równym strumieniem żel nawilżający.
- OptiLube Active<sup>TM</sup> wypełni i znieczuli moczowód.
- Miejscowy środek znieczulający zacznie działać w ciągu 5 minut; wprowadź cewnik.

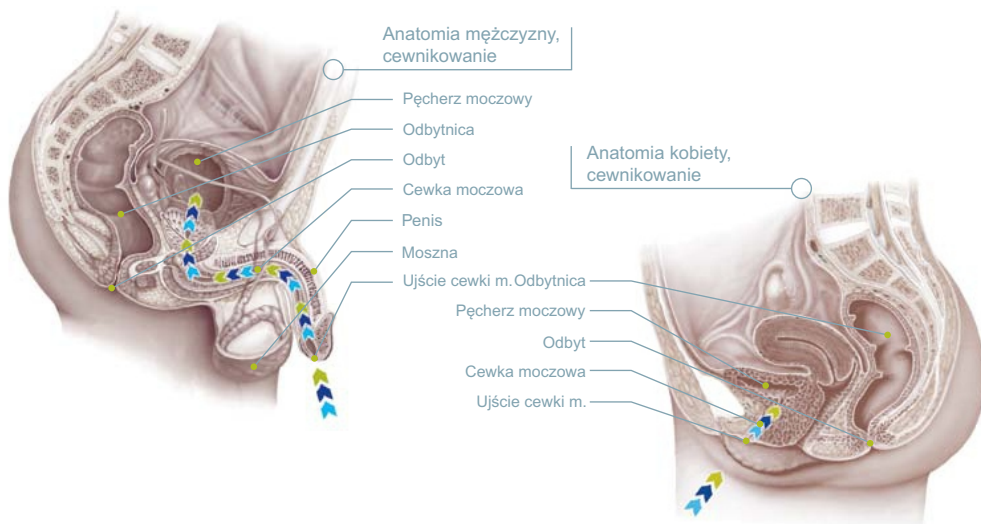

## Do czego służy OptiLube Active<sup>TM</sup>

- Cewnikowanie moczowodów i cewnikowanie nadłonowe
- Cystoskopia
- Sterylne wprowadzanie elementów drogą domaciczną
- Badania ginekologiczne
- Badania odbytu

### Skład w 100 g

Purified Water	68.00g
Lidocaine Hydrochloride	2.000g
Chlorhexidine Gluconate	0.250g
Methyl Hydroxybenzoate	0.060g
Propyl Hydroxybenzoate	0.025g
Hydroxyethylcellulose Propylene Glycol	

Kod	PIP kod	Produkt	Nazwa	Opakowanie	Karton
1160	366-2061	6ml Strzykawka	OptiLube Active <sup>TM</sup>	10 sztuk	100 sztuk
1161	366-2079	11ml Strzykawka	OptiLube Active <sup>TM</sup>	10 sztuk	100 sztuk

LATEX FREE



STERYLNY ŻEL NAWILŻAJĄCY

ANTYBAKTERYJNY  
ZNIECZULAJĄCY

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

LUBMEDICAL UL. LUCYNY HERC 58, 20-328 LUBLIN  
TEL/FAX: 81 44-100-02, E-mail: lubmedical@lubmedical.pl

PRODUCENT:

OPTIMUM MEDICAL SOLUTION 47 PARK SQUARE EAST,  
LEADS, UNITED KINGDOM