



optiLubeTM active

sterylny żel nawilżający
z Lidocainą

OptiLube ActiveTM to sterylny żel nawilżający zawierający środek znieczulający (Lidocaina 2%) i antybakteryjny (Chlorhexidina 0,25%). Każda gotowa do użycia strzykawka znajduje się w sterylnym opakowaniu. OptiLube ActiveTM dostępny jest w gotowych strzykawkach o pojemności 6ml i 11ml.

OptiLube ActiveTM ma zastosowanie przy cewnikowaniu i umieszczaniu przyrządów w jamach ciała.

Żel zapewnia optymalne nawilżenie, natomiast miejscowy środek znieczulający likwiduje ból, a przeciwbakteryjne właściwości środka ograniczają ryzyko infekcji.

6ml e


11ml e

STERILE R

CE 0473

Jak używać sterylnego żelu nawilżającego OptiLube ActiveTM w cewnikowaniu moczowodów techniką aseptyczną

- Usuń strzykawkę ze sterylnego woreczka odrywając papierek ochronny.
- Delikatnie naciśnij tłoczek na końcu strzykawki.
- Usuń niebieską zatyczkę.
- Nanieś małą ilość OptiLube ActiveTM dookoła ujścia moczowodu.
- Delikatnie wprowadź końcówkę do moczowodu.
- Wywierając jednorodny nacisk na strzykawkę powoli wstrzyknij równym strumieniem żel nawilżający.
- OptiLube ActiveTM wypełni i znieczuli moczowód.
- Miejscowy środek znieczulający zacznie działać w ciągu 5 minut; wprowadź cewnik.

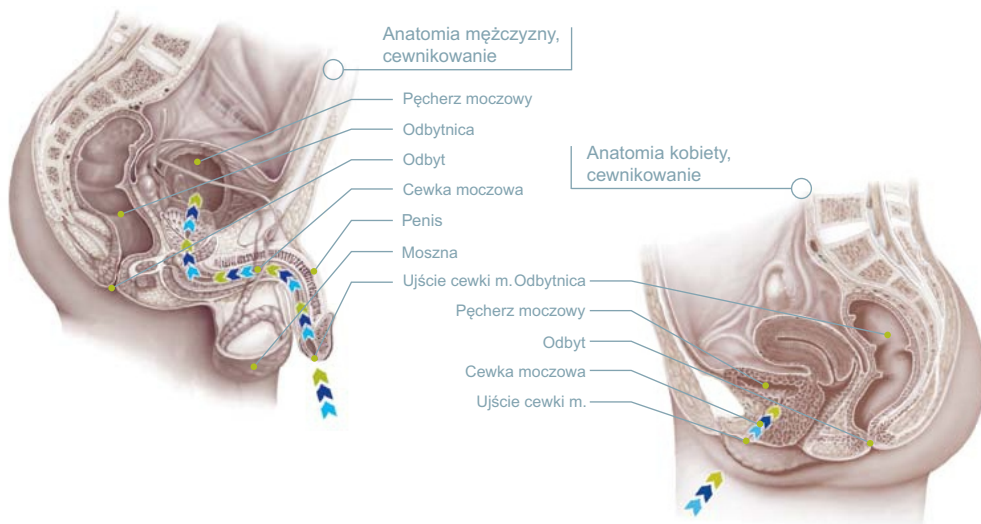

Do czego służy OptiLube ActiveTM

- Cewnikowanie moczowodów i cewnikowanie nadłonowe
- Cystoskopia
- Sterylne wprowadzanie elementów drogą domaciczną
- Badania ginekologiczne
- Badania odbytu

Skład w 100 g

Purified Water	68.00g
Lidocaine Hydrochloride	2.000g
Chlorhexidine Gluconate	0.250g
Methyl Hydroxybenzoate	0.060g
Propyl Hydroxybenzoate	0.025g
Hydroxyethylcellulose Propylene Glycol	

Kod	PIP kod	Produkt	Nazwa	Opakowanie	Karton
1160	366-2061	6ml Strzykawka	OptiLube Active TM	10 sztuk	100 sztuk
1161	366-2079	11ml Strzykawka	OptiLube Active TM	10 sztuk	100 sztuk

LATEX FREE



STERYLNY ŻEL NAWILŻAJĄCY

ANTYBAKTERYJNY
ZNIECZULAJĄCY

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

LUBMEDICAL UL. LUCYNY HERC 58, 20-328 LUBLIN
TEL/FAX: 81 44-100-02, E-mail: lubmedical@lubmedical.pl

PRODUCENT:

OPTIMUM MEDICAL SOLUTION 47 PARK SQUARE EAST,
LEADS, UNITED KINGDOM